

# INSTRUMENTVASKEREN

## Sikker håndtering av medisinsk flergangsutstyr i instrumentvaskeren

Klare rutiner rundt vaskeprosess og vedlikehold er viktig for å sikre trygt vaskeresultat hver gang.

Husk god håndhygiene og beskyttelsesutstyr!

### Kontroll før start av maskin:



1: Sjekk og rengjør filtre og siler.



2: Sjekk vaskearmen, skyllearmen og dyser.



3: Sjekk stigerør og kanne på vaskemiddel og tørremiddel. Husk å sjekke at det er kjemi i kannen.

### Ved behov: Forarbeid og bløtlegging

Fjern inntørket og vanskelig smuss med bløtlegging.



#### DekoRen+ Enzym

**Bløtlegging, manuell rengjøring og ultralydbad.**

Dosering: 3–5 g/l avhengig av tilsmussingsgrad.

Anbefalt temperatur: 35–40 °C i ca. 10 minutter.

Ved manuell dosering anbefales Lilleborg doseringspumpe.



**NB:** DekoRen+ etikettene har blitt oppgradert og fordelt på to sider. Produktet er ellers helt likt som tidligere.

### Kontroll ved lasting av maskin:



1: Last kurven så vannet treffer det som skal vaskes.



2: Vaskearmen må rotere fritt og klappeventiler må fungere.



3: Vaskevannet må treffe alt. Ingenting skal hindre vannet i å treffe noe annet.

**VIKTIG!**